

美歯口ホワイトニングの手順 アドバンス



1

AI タグの読み込み

NFC もしくは QR コードをスキャンしてください。



2

注意事項の確認


2回目以降で注意事項をご理解されている場合は手順を省略できます。



3

サービス同意書へ署名

サービス内容をご確認の上、日付の記入とご署名をお願い致します。

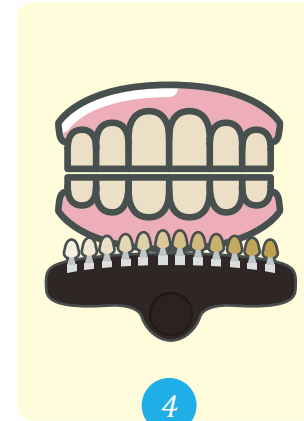

4

歯のトーンチェック

今の歯の色をシェードガイドの色番号 (SOO) で確認します。



5

紙エプロンを付ける

ザラザラした面が表になるように付けます。



6

みがく (クレンジングジェル+シロケン)


クレンジングジェルとシロケンで歯をみがきます。



7

みがく (ホワイトはみがき)

ホワイトはみがきを使って歯をみがきます。

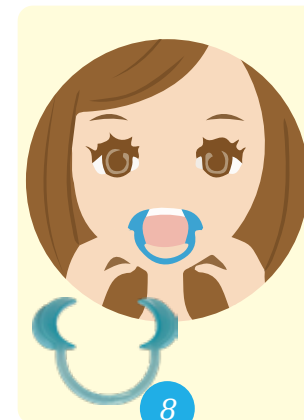

8

マウスオープナーの装着

オープナーのくぼみの部分を片側ずつ唇に引っかけて装着します。

美歯口ホワイトニングの手順 アドバンス



9 歯の表面の水分を取る

しっかりと水分をふき取ります。
※効果に影響が出ることもあるため



10 “美歯口液体歯磨き”

ボトルをよく振り、中央・左右と3~5プッシュを歯に吹きかけます。



11 アイガード装着

ライトの光から目を守るアイガードを装着します。



12 LEDライト照射 (8分)

STARTボタンを押して光を照射します。時間が経つと自動で停止します。




13 オープナー・アイガード取外し

上を向いたまま、アイガードとマウスオープナーを外します。



14 歯みがき

歯みがき粉を使わずに歯みがきをします。

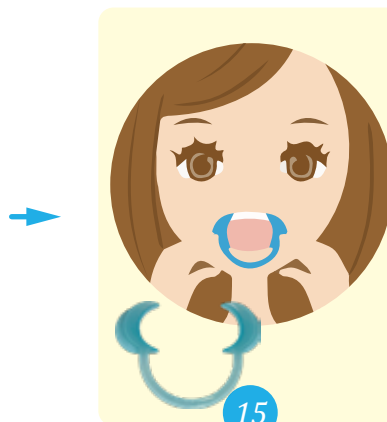

15 マウスオープナーの装着

オープナーのくぼみの部分を片側ずつ唇につっかけて装着します。



16 歯の表面の水分を取る

しっかりと水分をふき取ります。
※効果に影響が出ることもあるため

美歯口ホワイトニングの手順 アドバンス



“美歯口液体歯磨き”

ボトルをよく振り、中央・左右と3~5プッシュを歯に吹きかけます。



LEDライト照射 (8分)

STARTボタンを押して光を照射します。時間が経つと自動で停止します。



オープナー・アイガード取外し

上を向いたまま、アイガードとマウスオープナーを外します。



歯みがき

歯みがき粉を使わずに歯みがきをします。




トリートメント

仕上げに**トリートメント**を全体に行き渡るようにみがきます。



紙エプロンを外す

紙エプロンを外します。

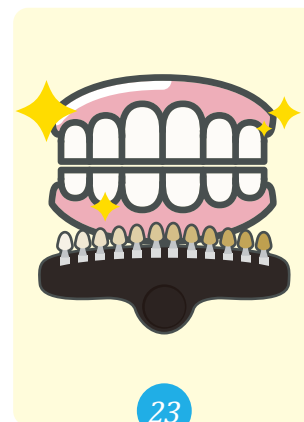

トーンチェック

サービスを受ける前との色の変化を確認します。

定期的にはサロンで
美歯口ホワイトニングをすることで
キレイな口元をキープすることができます。
おうちでの毎日のケアも忘れずにしましょう。

美歯口ホワイトニング
BIHAKU WHITENING